

ZÁRUČNÍ LIST

Datum prodeje:

Razítko a čitelný podpis prodávajícího:

- 1) Firma Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava – Vítkovice tímto dává záruku na výrobek 2 roky ode dne vydání zboží kupujícímu.
- 2) V záruční době se Ortgroup Medical s.r.o. zavazuje vykonat nevyhnutelné opravy za účelem možnosti opětovného používání zboží v termínu do 30dní od obdržení reklamace.
- 3) Ortgroup Medical s.r.o. si vyhrazuje právo výměny zboží v případě, že náklady na opravu uzná za nerentabilní.
- 4) V případě zjištění nesprávného fungování zboží je potřebné jej bezodkladně odeslat na adresu Ortgroup Medical s.r.o. – viz bod 1 nebo kontaktovat prodejce.
- 5) Před použitím výrobku je potřeba se seznámit s návodem na použití a řídit se instrukcemi v něm uvedenými. Použití výrobku v rozporu s jeho určením ztrácí nárok na záruku.
- 6) Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé ostrým předmětem, poškození vzniklé v důsledku působení vnějších mechanických sil, znečištění zboží mastnými substancemi či benzínem.
- 7) TENTO ZÁRUČNÍ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNĚ SPOLU S DOKLADEM O KOUPI. V PŘÍPADĚ REKLAMACE PROSÍME O PŘILOŽENÍ DOKLADU O KOUPI.
- 8) Reklamáce bez dokladu o koupi nebudou akceptované.

Výrobce:

ANTAR Sp. J.
I.Groniecka-Tarnkowska, A.Tarnkowski
ul. Zawiańska 43
03-068 Warszawa, Polsko



Distribuce:

Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava - Vítkovice
E-mail: ortgroup@ortgroup.cz, www.ortgroup.cz
Tel.: 596 630 615

NÁVOD K POUŽITÍ

CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ

AT02010



POUŽITÍ:

Chodítka je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Chodítka je určeno pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, nácvičku chůze, poutazových a pooteračních stavech a následné rehabilitaci. Je vhodné též pro transport drobných předmětů.

POPIS:

Skládací rám chodítka je vyrobený z povrchově upravených duralových trubek vysoké pevnosti. Rám je doplněn čtyřmi kolečkami, z nichž přední mají uložení v otočné vidlici a ergonomickými výškově nastavitelnými rukojetmi. Podvozek chodítka je rovněž výškově nastavitelný. Kolečka umožňují posunování chodítka a to tak, že silně uchopíte rukojeti chodítka a lehce tlačíte dopředu. Chodítka je vybaveno bowdenovými brzdami s možností aretace. Chodítka je vybaveno sedátkem a opěrkou zad.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

nastavitelná výška madel	81-98 cm
výška sedátka	53 cm
šířka rozloženého chodítka	62 cm
průměr koleček	19,8 cm
hmotnost	6,6kg
nosnost	136kg

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

Před používáním chodítka konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem. Před používáním chodítka si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě nejasností kontaktujte vašeho dodavatele. Uživatel chodítka musí dbát zvýšené opatrnosti. Uživatel se musí přemísťovat takovým způsobem, aby chodítka od něj neodjelo příliš daleko, jinak může dojít k převrácení. Při transportu nepoužívejte chodítka k sezení, chodítka nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost 136 kg. Při skládání a rozkládání postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů. Je-li chodítka v klidu, vždy zaaretujte brzdy. Při užívání chodítka musí být všechna kola v kontaktu s podkladem.

SLOŽENÍ A NASTAVENÍ CHODÍTKA:

Rám chodítka vyjměte z krabice a stlačením přední a zadní části od sebe chodítka rozložte. Madla vložte do otvorů v horní části rámu a nastavte požadovanou výšku madel, upevněte pomocí šroubů. Podvozek je rovněž výškově nastavitelný. Nasadte vidlici s kolečkami do

otvoru na spodní části rámu, vyberte ze čtyř poloh, která vám bude vyhovovat a nastavení zajistěte pojistkami. Brzdová lanka by měla vést zevně rámu i madel. Zasuňte opěrku zad zamáčknutím pojistek. Nakonec nasadte tašku, která se volně zavěsí na rám chodítka pod sedátkem.

Chodítka lze jednoduchým způsobem složit a to zatáhnutím blokovací pojistky směrem nahoru (nachází se pod sedátkem).

BRZDY:

Před každým použitím vyzkoušejte správnou funkci brzd. Při stlačení páky brzdy směrem nahoru by chodítka mělo přibrzdit až úplně zastavit. Stačením páky směrem dolů by se brzdy měly zaaretovat. Opačným způsobem brzdy odblokujte. Vždy používejte obě brzdy současně.

ÚDRŽBA:

Chodítka lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti a stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků, stav koleček a pravidelně promazávat ovládací lanka brzd, ev.odstraňovat mechanické nečistoty všech částí.

SERVIS A OPRAVA:

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který vám poskytne veškeré informace.

ZÁRUKA:

Záruka se poskytuje po dobu 24 měsíců od data převzetí pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakémkoliv úpravě, opravě nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem než výrobcem či dovozcem (viz níže) nebo prodávajícím. V případě reklamace se vždy obraťte na prodejce.

Výrobce:

ANTAR Sp. J.
I.Groniecka-Tarnkowska, A.Tarnkowski
ul. Zawiślańska 43
03-068 Warszawa, Polsko

Distribuce:

Ortgroup Medical s.r.o.,
1. Máje 3236/103,
703 00 Ostrava - Vítkovice
E-mail: ortgroup@ortgroup.cz, www.ortgroup.cz
Tel.: 596 630 615

