

NÁVOD K POUŽITÍ
ZÁVĚS RAMENNÍHO KLOUBU
AT04003 PRODYŠNÝ
AT04005 LÁTKOVÝ
AT04006 S UPEVNĚNÍM KOLEM PASU



Datum vydání návodu: 2023.01.15

v1-2023.01.15

Závěs slouží k udržení ruky a tím odlehčení ramene po úrazu, např. zlomenin nebo mírné podvrtnutí. Může se použít např. v době, kdy je ruka v sádře, při rehabilitaci nebo i při dislokaci loketního kloubu. Závěs je z odolného, prodyšného materiálu pro větší pohodlí a to zejména při nošení po dlouhou dobu. Úchyt na palec pomáhá udržovat ruku ve správné poloze.

NÁVOD NA APLIKACI ZÁVĚSU:

Před prvním použitím si vždy přečtěte tento návod k použití. Ortéza musí být vždy používána pouze v souladu s tímto návodem k použití.

Závěs zajišťuje podepření ramenního kloubu a udržuje ruku v ohnuté poloze. Široký pás zajišťuje rovnoměrné rozložení váhy po celé délce zad a zároveň reguluje výšku podepření ruky.

Ortézu vyjmeme z obalu a uvolníme popruh z plastového oválku. Poraněnou paži vložíme do kapsy textilu a popruh uložíme přes šíji pacienta. Textilní návlek na popruhu posuneme tak, aby byl v místě zátylku. Konec popruhu provlékne plastovým oválkem a přitáhneme tak, aby paže a předloktí svírala požadovaný úhel fixace. Volný konec popruhu přilepíme pomocí suchého zipu na popruh. V průběhu užívání ortézy korigujeme její nastavení.

Model AT04006 - dodatečná páska kolem těla úplně znehybnuje ruku v poloze u pasu. Jeden konec dodatečné pásky protáhneme plastovým oválkem a přichytíme suchým zipem. Pásku vedeme kolem těla (za zády) k plastovému oválku v části u dlaně. Konec pásky protáhneme plastovým oválkem a přitáhneme podle požadované velikosti a přichytíme suchým zipem.

POZOR:

V případě bolesti, alergických reakcí nebo jiných rušivých příznaků souvisejících s používáním zdravotnického prostředku, které jsou pro uživatele nejasné, se poraďte s lékařem.

UPOZORNĚNÍ:

Závěs lze prát pouze ručně ve vlažné vodě (40°C) s jemným čisticím prostředkem (např. mазlavé mýdlo). Nežehlete, nepoužívejte suché čištění ani bělidlo, neždímejte. Sušte rozložené, před sušením jemně vymačkejte vodu.

NEŽADOUČÍ PŘÍHODA

V případě „vážného incidentu“ souvisejícího s produktem, který vede přímo nebo nepřímo, může nebo by mohla vést k některé z následujících událostí:

- a) úmrtí pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
- b) dočasné nebo trvalé zhoršení zdravotního stavu pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
- c) vážné ohrožení veřejného zdraví

Tato „závažná událost“ musí být nahlášena výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, v němž má uživatel nebo pacient bydliště. V případě ČR je příslušným orgánem Státní ústav pro kontrolu léčiv, Odbor zdravotnických prostředků. Uživatel /pacient jsou povinni písemně oznámit výrobcí nebo zplnomocněnému zástupci a SÚKL jakoukoliv nežádoucí příhodu, která vznikla v souvislosti s použitím zdravotnického prostředku.

Na tento výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě s Nařízením (EU) MDR 2017/745 v platném znění a ve shodě s legislativními požadavky ČR na zdravotnické prostředky v platném znění.

POZNÁMKY:

V případě bolesti, alergických reakcí nebo jiných znepokojivých příznaků, které nejsou uživateli v souvislosti s používáním zdravotnického prostředku jasné, se poraďte se zdravotnickým pracovníkem.

JAK ZLIKVIDOVAT PROSTŘEDEK PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

Po vyřazení zdravotnického prostředku z provozu lze zdravotnický prostředek zlikvidovat jako běžný komunální odpad.

Rozměr (délka předloktí):

- XS (21 ÷ 23 cm)
- S (23,5 ÷ 25,4 cm)
- M (25,7 ÷ 30,5 cm)
- L (30,8 ÷ 35,6 cm)
- XL (35,9 ÷ 40,6 cm)

ZÁRUČNÍ LIST

Model:

Sériové číslo:

Datum prodeje:

Razítko a čitelný podpis prodávajícího:

- 1) Firma Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava – Vítkovice tímto dává záruku na výrobek 2 roky ode dne vydání zboží kupujícímu.
- 2) V záruční době se Ortgroup Medical s.r.o. zavazuje vykonat nevyhnutelné opravy za účelem možnosti opětovného používání zboží v termínu do 30dní od obdržení reklamace.
- 3) Ortgroup Medical s.r.o. si vyhrazuje právo výměny zboží v případě, že náklady na opravu uzná za nerentabilní.
- 4) V případě zjištění nesprávného fungování zboží je potřebné jej bezodkladně odeslat na adresu Ortgroup Medical s.r.o. – viz bod 1 nebo kontaktovat prodejce.
- 5) Před použitím výrobku je potřeba se seznámit s návodem na použití a řídit se instrukcemi v něm uvedenými. Výrobce nenes odpovědnost za škody vzniklé použitím výrobku v rozporu s tímto návodem k použití nebo v případě nedodržení instrukcí obsažených v tomto návodu k použití.
- 6) Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé ostrým předmětem, poškození vzniklé v důsledku působení vnějších mechanických sil, znečištění zboží mastnými substancemi či benzínem.
- 7) TENTO ZÁRUČNÍ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNĚ SPOLU S DOKLADEM O KOUPI. V PŘÍPADĚ REKLAMACE PROŠÍME O PŘILOŽENÍ DOKLADU O KOUPI.
- 8) Reklamace bez dokladu o koupi nebudou akceptované.



ANTAR Sp. J.
I.Groniecka-Tarnkowska, A.Tarnkowski
ul. Zawiańska 43 03-068 Warszawa, Polsko
email antar@antar.net tel 22 518 36 00



Distribuce:

Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava - Vítkovice
E-mail: ortgroup@ortgroup.cz, www.ortgroup.cz
Tel.: 596 630 615