

NÁVOD K POUŽITÍ

Ortézy hlezenního kloubu

Ortézy firmy Antar jsou vyrobeny, ze silného, elastického a „prodyšného“ materiálu.


Pomáhají udržet přirozenou tělesnou teplotu a zlepšují krevní oběh, a tím se zmenšuje bolest, otoky a ztuhnutí, a kromě toho tyto ortézy umožňují rychlejší léčbu úrazů.

Model AT04205 je určen k plné fixaci hlezenního kloubu, obsahuje dvě postranní plastové dlahy a jednu duralovou, anatomicky tvarovatelnou dlahou v lýtkové části, jež společně zajišťují dostatečnou fixaci kloubu u uvedených indikací.

Ortéza je určena pro pacienty, kde není vhodné chování a zatěžování postižené končetiny.

Model AT04206 je určen ke zpevnění hlezenního kloubu na principu tejpování. Do ortézy jsou po stranách všívané plastové výztuhy, které zvyšují její stabilitu.

Postup při aplikaci AT04205:

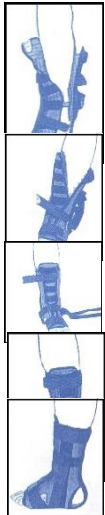

1. Usadíme končetinu do rozepnuté ortézy.

2. Spojíme textilní díly suchým zipem v oblasti nártu, přitáhneme a připneme popruhem.

3. Spojíme textilní díly suchým zipem na přední straně bérce k jazyku, přitáhneme a připneme popruhem.

4. Osmičkové opásání pomocí popruhů vedeme přes nárt k pouzdru dlah (upnutí dlah).

5. Dbáme na správné usazení paty až k dlazi.

Návod na aplikaci AT04206:

Uchopte ortézu uprostřed pelot a navlečte ji na nohu tak, aby byla patová část správně umístěna na patě. V případě potřeby upravte polohu pelot tak, aby obě dvě správně obepínaly kotník. Nyní pásku omotejte okolo chodidla a nad kotníkem do tvaru osmičky. Pásky nesmí tvořit záhyby. Pásku upevněte pomocí suchých zipů.

Ortézu perte ručně ve vlažné vodě. Nepoužívejte bělidla. Ortézu nežehlete ani neperte nasucho.

Upozornění: Pokud jste použili mast nebo zahřívací gel, ortézu nepoužívejte.

Přílišné utážení pásků vede k otokům periferie končetiny (konečků prstů).

Nedostatečné upnutí pásků a nesprávné usazení končetiny snižuje funkčnost pomůcky.

Velikosti: délka chodidla

AT04205

XS: 19-21cm

S: 22-24cm

M: 25-27cm

L: 28-29cm

XL: 30-31cm

XXL: 32-33cm

AT04206

S: 15,6-20,6cm

M: 21-25,7cm

L: 26-30,8cm

XL: 31,1-35,9cm

Distribuce:

Ortgroup Medical s.r.o.

1.Máje 3236/103

703 00 Ostrava – Vítkovice

Tel:596615630

e-mail: ortgoup@ortgroup.cz

Výrobce:

ANTAR Sp. J.

ul. Zawisłańska

4303-068 Warszawa



v.CZ-02-12.2017