


# AT 51021 Stolek k lůžku

## Použití:

Stolek se používá jako doplněk pro pacienty upoutané na lůžko. Své využití nacházejí zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen používat standardní jídelní stůl. Má pevnou konstrukci a nastavitelnou výškou. Deska stolu se skládá ze dvou částí: 1/3 pevná a 2/3 je úhlově nastavitelná část, čímž může být přizpůsobena individuálním potřebám. Svou konstrukcí usnadňuje pacientům běžné úkony na lůžku a zároveň eliminují možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňují soběstačnost pacienta. Stolek má dvě drážky, které zabraňují sklouznutí předmětů (táček s jídlem, knihy apod.). Je vybaven 4 kolečky s brzdou.

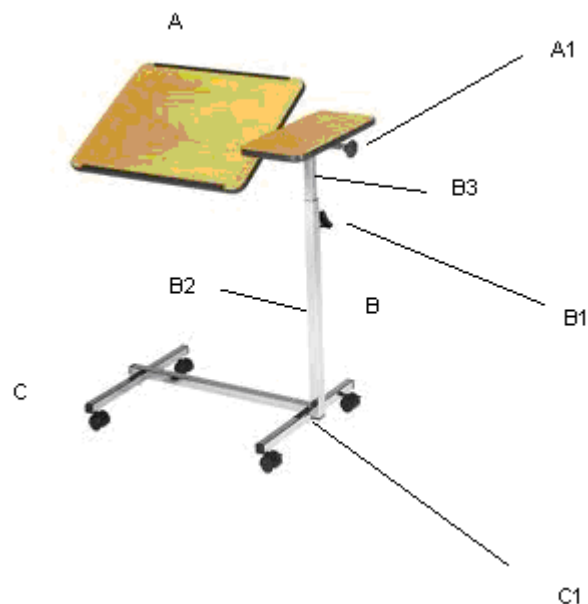

**Popis:** U typu CA 202 je část (1/3) pracovní plochy pevná a část (2/3) je úhlově nastavitelná.

Stolek je výškově nastavitelný od 76 cm do 120 cm.

A-pracovní deska

A1-aretační šroub naklání pracovní plochy

B-výškově nastavitelná noha stolu

B1-aretační šroub výškového nastavení

B2-spodní část nohy stolku

B3-horní část nohy stolku

C-rám tvaru I se čtyřmi kolečky s brzdou

D-4 ks šroub s maticí a podložkou M 6

F-1 ks šroub s maticí a podložkou M 8

G-1 ks šroub s podložkou M 8

H-ks montážní klíč oboustranný 10 a 13

K-1 ks imbusový klíč 5

L-1 ks imbusový klíč 4

**Složení stolku:** Povolte (vlevo) B1, vysuňte B3, pomocí D (4 ks) upevněte B3 k A a použijte klíč H a L.

Příšroubujte B2 k C použitím šroubu G a F. Dotáhněte pomocí klíčů H a K (šroub G jen klíčem K). Vsuňte B3 do B2 tak, že pracovní deska A je nad rámem I, nastavte požadovanou výšku a dotáhněte B1.

**Údržba:** stolek k lůžku lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla.

**Varování:** Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků, stav koleček atd.

## SERVIS A OPRAVA:

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který vám poskytne veškeré informace.

## ZÁRUKA:

Záruka se poskytuje po dobu 24 měsíců od data převzetí pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem než výrobcem či dovozcem (viz níže) nebo prodávajícím.

## LIKVIDACE PRODUKTU

Při likvidaci použitého invalidního vozíku je nutné dodržovat příslušné předpisy pro likvidaci odpadu

Důrazně doporučujeme kontaktovat vašeho místního autorizovaného dodavatele, který zajistí likvidaci vašeho invalidního vozíku.

## NEŽADOUCÍ PŘÍHODA

V případě „vážného incidentu“ souvisejícího s produktem, který vede přímo nebo nepřímo, může nebo by mohla vést k některé z následujících událostí:

- úmrtí pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
- dočasné nebo trvalé zhoršení zdravotního stavu pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
- vážné ohrožení veřejného zdraví

tato „závažná událost“ musí být nahlášena výrobcem a příslušnému orgánu členského státu, v němž má uživatel nebo pacient bydliště. V případě ČR je příslušným orgánem Úřad pro registraci léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a biocidních přípravků.

Uživatel/pacient jsou povinni písemně oznámit výrobcem nebo zplnomocněnému zástupci a SÚKL jakoukoliv nežádoucí příhodu, která vznikla v souvislosti s použitím zdravotnického prostředku.

**Varování:** V případě bolesti, alergických reakcí nebo jiných rušivých příznaků souvisejících s používáním zdravotnického prostředku, které jsou pro uživatele nejasné, se poraďte s lékařem.

## ZÁRUČNÍ LIST

Datum prodeje:

Razítko a čitelný podpis prodávajícího:

1) Firma Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava – Vítkovice tímto dává záruku na výrobek 2 roky ode dne vydání zboží kupujícímu.

2) V záruční době se Ortgroup Medical s.r.o. zavazuje vykonat nevyhnutelné opravy za účelem možnosti opětovného používání zboží v termínu do 30dní od obdržení reklamace.

3) Ortgroup Medical s.r.o. si vyhrazuje právo výměny zboží v případě, že náklady na opravu uzná za nerentabilní.

4) V případě zjištění nesprávného fungování zboží je potřebné jej bezodkladně odeslat na adresu Ortgroup Medical s.r.o. – viz bod 1 nebo kontaktovat prodejce.

5) Před použitím výrobku je potřeba se seznámit s návodem na použití a řídit se instrukcemi v něm uvedenými. Použití výrobku v rozporu s jeho určením ztrácí nárok na záruku.

6) Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé ostrým předmětem, poškození vzniklé v důsledku působení vnějších mechanických sil, znečištění zboží mastnými substancemi či benzínem.

7) TENTO ZÁRUČNÍ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNĚ SPOLU S DOKLADEM O KOUPI. V PŘÍPADĚ REKLAMACE PROSÍME O PŘILOŽENÍ DOKLADU O KOUPI.

8) Reklamace bez dokladu o koupi nebudou akceptované.

### **Výrobce:**

ANTAR Sp. J.  
I.Groniecka-Tarnkowska,  
A.Tarnkowski ul.  
Zawiślańska 43  
03-068 Warszawa, Polsko



### **Distribuce:**

Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00  
Ostrava - Vítkovice E-mail: [ortgroup@ortgroup.cz](mailto:ortgroup@ortgroup.cz),  
[www.ortgroup.cz](http://www.ortgroup.cz)  
Tel.: 596 630 615

