

ZÁRUČNÍ LIST

Datum prodeje:

Razítko a čitelný podpis prodávajícího:

- 1) Firma Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava – Vítkovice tímto dává záruku na výrobek 2 roky ode dne vydání zboží kupujícímu.
- 2) V záruční době se Ortgroup Medical s.r.o. zavazuje vykonat nevyhnutelné opravy za účelem možnosti opětovného používání zboží v termínu do 30dní od obdržení reklamace.
- 3) Ortgroup Medical s.r.o. si vyhrazuje právo výměny zboží v případě, že náklady na opravu uzná za nerentabilní.
- 4) V případě zjištění nesprávného fungování zboží je potřebné jej bezodkladně odeslat na adresu Ortgroup Medical s.r.o. – viz bod 1 nebo kontaktovat prodejce.
- 5) Před použitím výrobku je potřeba se seznámit s návodem na použití a řídit se instrukcemi v něm uvedenými. Použití výrobku v rozporu s jeho určením ztrácí nárok na záruku.
- 6) Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé ostrým předmětem, poškození vzniklé v důsledku působení vnějších mechanických sil, znečištění zboží mastnými substancemi či benzínem.
- 7) TENTO ZÁRUČNÍ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNĚ SPOLU S DOKLADEM O KOUPI. V PŘÍPADĚ REKLAMACE PROSÍME O PŘILOŽENÍ DOKLADU O KOUPI.
- 8) Reklamacie bez dokladu o koupi nebudou akceptované.

Výrobce:

ANTAR Sp. J.
I.Groniecka-Tarnkowska, A.Tarnkowski
ul. Zawiańska 43
03-068 Warszawa, Polsko



Distribuce:

Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava - Vítkovice
E-mail: ortgroup@ortgroup.cz, www.ortgroup.cz
Tel.: 596 630 615

Návod k použití

PODLOŽKA ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ AT52107



Upozornění:


1. Před užíváním se seznamte s návodem k použití.
2. Dejte pozor, s jakým povrchem je spodní část podložky v kontaktu, aby nedošlo k posouvání podložky.
3. Nepoužívejte jehly ani žádné jiné ostré předměty v kontaktu s podložkou.
4. Podložku naplňte odpovídajícím množstvím vzduchu během používání.
5. Podložku udržujte dál od ohně a vlhkosti.
6. Nepřehýbejte/neskládejte podložku během nafukování.
7. Pokud je jakákoliv část těla v kontaktu s polštářem příliš dlouho, bude vzduch unikat z dané oblasti, čímž se snižuje terapeutický účinek.
8. Podložku byste měli zkontrolovat denně (regulace tlaku), abyste se ujistili, že při sezení nebudete na tvrdém povrchu.
9. Podložku i je všechny její součásti udržujte v suchu.

Specifikace produktu:

Rozměry: 40x40x6cm, 40x45cm, 45x45cm

Nosnost: 150kg



1. Díky rovnoměrnému rozložení tlaku na kyčelní klouby, poskytuje podložka komfort a stabilitu.
2. Podložka je určena zejména pacientům, kteří mají vysoké riziko vzniku proleženin.
3. Vzduchem naplněné komory zajišťují vyváženější a stabilnější pozici těla, aniž by došlo k účinkům mořské nemoci.
4. Polštář je vhodný pro osoby se zdravotním postižením, seniory, administrativní pracovníky, řidiče, lidé, kteří dlouhodobě sedí, apod.

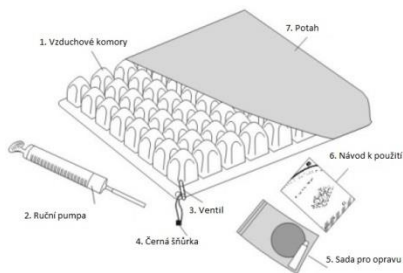

7. Potah - polyesterová tkanina, pro udržení stability vzduchových komor a proti sklouznutí podložky z povrchu.

Návod k použití


1. Umístěte podložku na vozík (popř. tam, kde budete sedět), otočte krytem doleva pro otevření ventilu.
2. Pomocí vzduchové pumpy a ventilu nafoukněte podložku, až dokud vzduchové komůrky nebudou všechny naplněny.

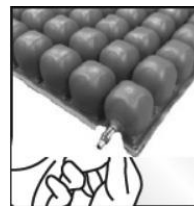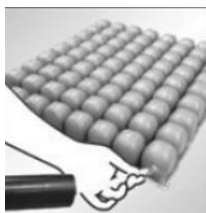

3. Otočte otvorem vpravo pro uzavření ventilu. Sundejte pumpu.



4. Po nafouknutí se uživatel posadí na přefouknutou podložku tak, aby měl příslušně uspořádané ramena a nohy.

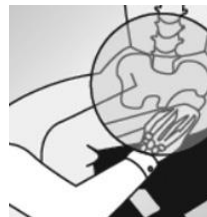

5. Dejte ruku mezi podušku a kostrč sedícího a upravte ho, aby seděl správně.



6. Poté jemně pouštějte vzduch s podložky, dokud nebude mít správnou „měkkost“.

Návod k čištění

Podložka:

1. Používejte desinfekční prostředky k čištění.
2. Použijte ručník k vysušení podložky, nepoužívejte čisticí prostředky ani jiné rozpouštědla.
3. Nečistěte mechanicky ani nesusušte v sušičce.
4. Neohřívejte ani nepoužívejte v autoklávu.

Potah:

1. Perte při teplotě max. do 30°C, nežehlete.
2. Z hygienických důvodů musí být podložka používána pouze 1 uživatelem.
3. Doporučujeme pořídit náhradní potah na výměnu pro vyprání jednoho potahu, aby uživatel neseseděl na podložce bez potahu.

Opravy netěsností:

1. Ujistěte se, že je podložka až do všech 4 rohů kompletně nafouknutá.
2. Ponořte nafouknutou podložku do vody, abyste zjistili, kde uniká vzduch.
3. Pokud naleznete místo úniku, označte jej vložením párátko.
4. Vyjměte polštář a vyfoukněte vzduch.
5. Nechte polštář vyschnout a potom vyjměte párátko.
6. Vyčistěte místo úniku, počkejte, až uschne.
7. Umístěte náplast na netěsnosti.
8. Tlačte náplast pevně, aby se místo dobře zalepilo. Podložku nepoužívejte po dobu 30 minut.
9. Než začnete podložku znova používat, nafoukněte ji dle návodu.