

TECHNICKÉ PRVKY

PRVEK	OVLÁDACÍ JEDNOTKA PUMPY
Napájení	110-127 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50/60 Hz 1A
Vypouštěcí otvor	8 l./min.
Hodnota pojistek	1A/ 250 V
Tlak	70 mmHg - 110 mmHg
Rozměry	18 (š) x 15,3 (d) x 9 (v) cm
Cyklus	30-40 minut
Hmotnost	1,5 kg
Teplota prostředí	Provoz: 50°F~95°F (10°C~35°C) Skladování: 5°F~122°F (-15°C~50°C)
Vlhkost prostředí	Provoz: 20%~80% bez kondenzace Skladování: 10% ~ 90% bez kondenzace

PRVEK	MATRACE
Rozměry	203 (d) x 89 (š) x 20 (v) cm
Materiál povlaku	Nylon/PU se zipem
Materiál vzduchových komůrek	Nylon/PVC
Materiál základny	Nylon/PVC
Nosnost	180 kg

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Pokud níže uvedené informace nebudou dostatečné pro zodpovězení vašich dotazů, kontaktujte přímo prodejce. Někdy je třeba řešení problému svěřit odborníkovi.

Žádné kontrolky na ovládací jednotce nesvítí.	Zkontrolujte, zda je jednotka připojena k síťovému napájení a zda je zapnutá. Zkontrolujte, zda není spálená pojistka na ovládací jednotce, případně pojistka síťového připojení.
Výstraha nízkého tlaku	Zkontrolujte síťové napájení ovládací jednotky a zda je zasunutá zástrčka. Zkontrolujte správné připojení vzduchového konektoru matrace k pumpě. Zkontrolujte správné připojení konektoru CPR. Pod povlakem matrace zkontrolujte, že jsou všechny konektory „T“ a „L“ připojeny ke vzduchovým hadicím. Zkontrolujte, že hadice nejsou zamotané, skřípnuté nebo poškozené.
Tělo pacienta je uprostřed propadlé nebo se pacient převrací	Zvyšte hodnotu nastavení pohodlného tlaku. Před další změnou tlaku počkejte několik minut, než se tlak stabilizuje.
Ovládání zamčeno nebo „zamrzlé“	Vypněte ovládací jednotku a odpojte pumpu. Po několika minutách ovládací jednotku znovu připojte a zapněte.

ČIŠTĚNÍ A DESINFEKCE



VÝSTRAHA!

Před zahájením čištění odpojte pumpu.

Matraci čistěte slabým mýdlovým roztokem. Pumpu nenamáčejte ani neponořujte do kapaliny. Po vyčištění matraci usušte tak, aby nebyla vystavena přímému slunci. Kontrolujte, zda přípojovací hadice pumpy nejsou ucpány prachem nebo jinými nečistotami. V případě potřeby vyčistěte hadice měkkým tamponem.

ÚDRŽBA

V případě nutnosti opravy používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.

POZNÁMKA:

K čištění matrace se nesmí používat kyseliny, alkalické čističe ani rozpouštědla.



Výrobce:
ANTAR Sp. J.
I.Groniecka-Tarnkowska, A.Tarnkowski
ul. Zawiańska 43
03-068 Warszawa, Polsko



Distribuce:
Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103,
703 00 Ostrava - Vítkovice
E-mail: ortgroup@ortgroup.cz, www.ortgroup.cz
Tel.: 596 630 615

NÁVOD K POUŽITÍ

MATRACE ANTIDEKUBITNÍ AT52113



ÚVOD

Děkujeme, že jste si zakoupili nafukovací matraci se střídavým tlakem a pumpou. Tato uživatelská příručka obsahuje pokyny ke správnému používání výrobku a poskytuje cenné rady týkající se vaší bezpečnosti. Před použitím výrobku si příručku důkladně prostudujte. V případě dotazů požádejte o radu nebo pomoc prodejce.

PŘEDNÍ STRANA



INSTALACE

Matrace je vyměnitelná. Položte matraci přímo na rám lůžka tak, aby konektory pro připojení vzduchových hadic byly umístěny u nožního čela.

Zavěste pumpu na nožní čelo lůžka s použitím háček na zadní stěně pumpy, nebo ji položte na rovnou plochu.

Připojte konektory vzduchových hadic matrace k pumpě. Hadice nesmí být zamotané nebo skřípnuté pod matrací.

Zapněte napájecí kabel do elektrické zásuvky.

Zapněte napájení.

Počkejte 30–40 minut, dokud se matrace zcela nenafoukne.

SKLADOVÁNÍ

Vypněte síťové napájení a odpojte napájecí kabel. Odpojte pumpu od matrace a matraci uložte na plochu.

Matraci přeložte na polovinu od strany nohou ke straně hlavy.

Vytlačte z matrace vzduch pro zmenšení skladovacích rozměrů.

Nasaďte ochrannou krytku na rychlospojku.

SERVIS A OPRAVA:

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který vám poskytne veškeré informace.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Nafukovací matrace se střídavým tlakem je určena k prevenci a léčbě ran a proleženin při dlouhodobé hospitalizaci nebo v případě dlouhodobě ležících pacientů v domácí péči nebo péči ve speciálních zařízeních pro dlouhodobě nemocné.

ZADNÍ STRANA



ZÁRUKA:

Záruka se poskytuje po dobu 24 měsíců od data převzetí pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakémkoliv úpravě, opravě, seřizením nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem než výrobcem či dovozcem (viz níže) nebo prodávajícím.

LIKVIDACE: Výrobek likvidujte souladu s platnými předpisy pro likvidaci odpadu.


NEŽÁDOUCÍ PŘÍHODA

V případě „vážného incidentu“ souvisejícího s produktem, který vede přímo nebo nepřímo, může nebo by mohla vést k některé z následujících událostí:

- úmrtí pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
 - dočasné nebo trvalé zhoršení zdravotního stavu pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
 - vážné ohrožení veřejného zdraví
- tato „závažná událost“ musí být nahlášena výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, v němž má uživatel nebo pacient bydliště. V případě ČR je příslušným orgánem Státní ústav pro kontrolu léčiv, Odbor zdravotnických prostředků. Uživatel/pacient jsou povinni písemně oznámit výrobcí nebo zplnomocněnému zástupci a SÚKL jakoukoliv nežádoucí příhodu, která vznikla v souvislosti s použitím zdravotnického prostředku.

Na tento výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě s Nařízením (EU) MDR 2017/745 v platném znění a ve shodě s legislativními požadavky ČR na zdravotnické prostředky v platném znění.

OVLADAČE A DALŠÍ PRVKY

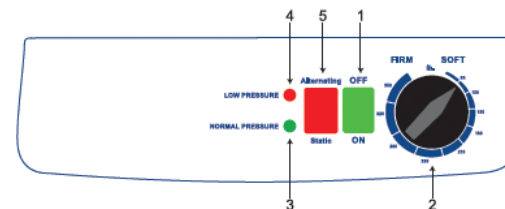

1. Vypínač

Při zapnutí/vypnutí napájení se pumpa spustí/zastaví.



2. Kruhový ovladač pro seřízení tlaku (podle hmotnosti pacienta)

Použijte tabulku tělesných hmotností a otočte kolečkem seřízení tlaku tak, abyste nastavili pohodlnou úroveň tlaku.



3. Ukazatel normálního tlaku

Optický ukazatel (zelené barvy) signalizuje, že tlak dosáhl nastavené úrovně.



4. Ukazatel nízkého tlaku

Optický ukazatel (oranžové barvy) upozorní uživatele, že tlak poklesl pod nastavenou hladinu.




5. Přepínač režimů

Pro zapnutí funkce střídavého tlaku přepněte přepínač do polohy „Alternating“ (Střídavý). Pro přepnutí do režimu stálého tlaku přepněte přepínač do polohy „Static“ (Statický).

POZNÁMKA: V režimu stálého tlaku poskytujte matrace pevnou plochu pro snazší přemístění nebo polohování pacienta. Režim stálého tlaku také pomáhá zabránit převrácení pacienta v poloze vsedě.

POZNÁMKA: Po přepnutí přepínače může přechod do jiného režimu trvat až 6 minut.

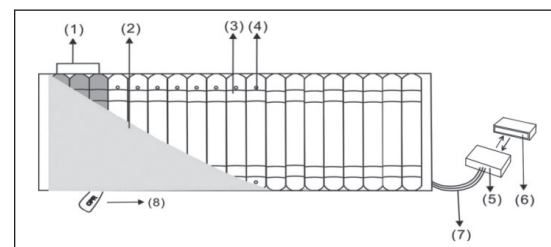

ZÁRUČNÍ LIST:

Typ:

Číslo série:

Datum prodeje:

Razítko prodejce a čitelný podpis prodávajícího:

Firma Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00, Ostrava – Vítkovice, dává od datumu prodeje záruku 2 roky matrace

Během trvání záruční doby se firma Ortgroup Medical s.r.o. zavazuje zajistit nezbytné opravy, aby byla matrace funkční, a to v období 30 dnů od datumu obdržení reklamovaného zboží.

Pokud Ortgroup Medical s.r.o. zjistí, že náklady na opravu jsou nerentabilní, může dojít k výměně výrobku.

Pokud zjistíte, že výrobek funguje nesprávně, zašlete jej na adresu firmy Ortgroup medical s.r.o. (bod 1) nebo se obraťte na prodejce

Než začnete výrobek používat, seznamte se s návodem k obsluze. Nedodržením pokynů výrobce, zaniká nárok na záruční opravu.