

## ZÁRUČNÍ LIST

Datum prodeje:

Razítko a čitelný podpis prodávajícího:

1) Firma Ortgrou Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava – Vítkovice tímto dává záruku na výrobek 2 roky ode dne vydání zboží kupujícímu.

2) V záruční době se Ortgrou Medical s.r.o. zavazuje vykonat nevyhnutelné opravy za účelem možnosti opětovného používání zboží v termínu do 30dní od obdržení reklamace.

3) Ortgrou Medical s.r.o. si vyhrazuje právo výměny zboží v případě, že náklady na opravu uzná za nerentabilní.

4) V případě zjištění nesprávného fungování zboží je potřebné jej bezodkladně odeslat na adresu prodejce nebo kontaktovat prodejce.

5) Před použitím výrobku je potřeba se seznámit s návodem na použití a řídit se instrukcemi v něm uvedenými. Použití výrobku v rozporu s jeho určením ztrácí nárok na záruku. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé použitím výrobku v rozporu s tímto návodem k použití nebo v případě nedodržení instrukcí obsažených v tomto návodu k použití.

6) Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé ostrým předmětem, poškození vzniklé v důsledku působení vnějších mechanických sil, znečištění zboží mastnými substancemi či benzínem.

7) TENTO ZÁRUČNÍ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNĚ SPOLU S DOKLADEM O KOUPI. V PŘÍPADĚ REKLAMACE PROSÍME O PŘILOŽENÍ DOKLADU O KOUPI. Reklamáce bez dokladu o koupi nebudou akceptované.

### Výrobce:

ANTAR Sp. J.

I.Groniecka-Tarnkowska, A.Tarnkowski  
ul. Zawiślańska 43 03-068 Warszawa, Polsko  
email [antar@antar.net](mailto:antar@antar.net) tel 22 518 36 00

### Distribuce:

Ortgrou Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava - Vítkovice  
E-mail: [ortgroup@ortgroup.cz](mailto:ortgroup@ortgroup.cz), [www.ortgroup.cz](http://www.ortgroup.cz)  
Tel.: 596 630 615



## NÁVOD K POUŽITÍ CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ AT51113



Datum vydání návodu 25.05.2021  
Datum poslední revize: 08.03.2022  
REV. V 02

## Použití

Chodítko slouží ke kompenzaci snížené funkce dolních končetin pomocí opory horních končetin nebo trupu a vede k podpoře a jistotě při chůzi. Může být použito jak uvnitř, tak i venku na rovném terénu. Není možné je používat při výrazných omezeních funkce rukou/paží nebo při silných poruchách rovnováhy. Rovněž je nelze používat k převážení osob. Sedací plocha slouží jako sedátko pouze tehdy, jsou-li zajištěny a funkční obě parkovací brzdy!

Před použitím prostudujte pečlivě tento návod, na jehož základě se seznámíte s použitím výrobku. Kromě toho návod obsahuje i pokyny pro péči a údržbu chodítka.

## Popis

Skládací rám chodítka je vyrobený z povrchově upravených duralových trubek vysoké pevnosti. Rám je doplněn čtyřmi kolečky, z nichž přední mají uložení v otočné vidlici a ergonomickými výškově nastavitelnými rukojeťmi. Kolečka umožňují posouvání chodítka a to tak, že silně uchopíte rukojeti chodítka a lehce tlačíte dopředu. Chodítko je vybaveno bowdenovými brzdami s možností aretace. Chodítko je vybaveno sedátkem a odnímatelnou taškou.

### Technická data:

Celková šíře	64 cm
Celková hloubka	70 cm
Výška sedáku	56 cm
Sedací plocha	45x25 cm
Hmotnost	8,4 kg
Výškově nastav. rukojeti	95-108 cm
Přední i zadní kola	Průměr 20cm
Brzdy	multifunkční
Nosnost	max. 136 kg



Tento symbol označuje maximální hmotnost uživatele

## Montáž

- Zatlačte shora na rám sedací plochy poté, co položíte chodítko na zem na kolečka a rozložte jej. Při správném rozložení dojde k zacvaknutí pojistky proti stlačení.

- nasadte do otvorů v rámu a nastavte výšku držadel podle následujícího popisu:

Zmáčkněte boční zajišťovací pojistku a nastavte posuvnou trubku do takové výše, aby uživateli vyhovovala. Rozsah výškového nastavení je vidět na rámu (6 otvorů, do kterých pojistka zapadá).

Po té nasadte do trubky pod loketní opěru madlo a nastavte vzdálenost madla od loketní opěrky.

Nastavení lze provést v 6-ti krocích po 25mm. Nastavení zajistěte šroubem pod loketní opěrou.

Nakonec nasadte textilní tašku.

Před každým použitím chodítka vyzkoušejte, zda jsou madla pevně zajištěna!

### Brzdový systém

Vaše chodítko je vybaveno multifunkčními brzdami. Páka brzdy slouží jako provozní i parkovací brzda. Pro krátkodobé zabrzdění (provozní brzda) potáhněte za páku brzdy směrem k sobě. K dlouhodobému zabrzdění (parkovací brzda) zatlačte páku brzdy od sebe do krajní polohy (cvaknutí je cítit i slyšet). Takto zabrzděná kola jsou zablokována, dokud páku brzdy neposunete opět k sobě. Pro blokování obou koleček použijte funkci obou brzd (vpravo i vlevo). Před každým použitím chodítka vyzkoušejte spolehlivost brzd!

### Bezpečnostní pokyny

Dbejte, aby se na ploše před kolečky nenacházely kameny nebo jiné předměty, které by mohly představovat překážku. Dbejte na správné nastavení brzdových táhel.

Dbejte, aby před použitím chodítka byly brzdy vždy v parkovací pozici. Teprve až budete jistě stát, uvolněte parkovací brzdy.

Přesvědčte se před použitím, zda jsou zajišťovací šrouby nasunovací trubky madla zajištěny.

Ujistěte se, že je pojistka proti zaklapnutí (složení) chodítka dobře zajištěna.

Chodítko během používání nezvedejte. Mohlo by se zaklapnout a přivodit pád.

S použitím začněte až poté, co jistě stojíte a máte obě ruce na madlech.

Nechypte se držadel mokřýma rukama, můžete uklouznout a ztratit rovnováhu. Pokud se během chůze unavíte, můžete si sednout na sedátko. Nejdříve však uveďte brzdy do parkovací polohy.

### Upozornění

Výrobek může být zatížen max. 136kg a použit jen na rovných plochách.

Nenajíždějte chodítkem na schody nebo stupně vyšší než 20 mm

Při použití venku jeďte jen po rovných cestách a vyhýbejte se vysokým hranám chodníku.

Vyhledejte si místo, kde je chodník snížen pro nájezd.

Nepoužívejte chodítko v plynulém provozu na cestě, používejte rovné cesty pro pěší. Vyhýbejte se jízdě po „kočičích hlavách“ nebo podobném povrchu – můžete přestat chodítko ovládat.

Nepoužívejte chodítko na silně stoupajících cestách nebo cestách se strmým sklonem.

Nepoužívejte chodítko k transportu osob nebo nadměrných předmětů.

Výrobce nepřebírá záruku, pokud není chodítko použito přiměřeně svému určení a pokud nejsou provedeny přejímací zkoušky uvedené v návodu na použití.

### Údržba

Chodítko lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti a stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků, stav koleček a pravidelně promazávat ovládací lanka brzd, ev. odstraňovat mechanické nečistoty všech částí.

### Servis a oprava

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který vám poskytne veškeré informace.

### Záruka

Záruka se poskytuje po dobu 24 měsíců od data převzetí pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakémkoliv úpravě, opravě nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem než výrobcem či dovozcem (viz níže) nebo prodávajícím.

V případě reklamace se vždy obračejte na prodejce.

### LIKVIDACE

Při likvidaci použitého výrobku je nutné dodržovat příslušné předpisy pro likvidaci odpadu. Výrobek nepatří do komunálního odpadu. Výrobek obsahuje části, které lze dále recyklovat. Proto jej po ukončení používání zlikvidujte předáním do sběrného dvora.

### NEŽADOUcí PŘÍHODA

V případě „vážného incidentu“ souvisejícího s produktem, který vede přímo nebo nepřímo, může nebo by mohla vést k některé z následujících událostí:

- úmrtí pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
- dočasné nebo trvalé zhoršení zdravotního stavu pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
- vážné ohrožení veřejného zdraví

tato „závažná událost“ musí být nahlášena výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, v němž má uživatel nebo pacient bydliště. V případě ČR je příslušným orgánem SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv, Odbor zdravotnických prostředků). Uživatel/pacient jsou povinni písemně oznámit výrobci nebo zplnomocněnému zástupci a SÚKL jakoukoliv nežádoucí příhodu, která vznikla v souvislosti s použitím zdravotnického prostředku.

### PROHLÁŠENÍ

Na tento výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě s Nařízením (EU) MDR 2017/745 v platném znění a ve shodě s legislativními požadavky ČR na zdravotnické prostředky v platném znění.