

ZÁRUČNÍ LIST

MODEL:

Datum prodeje:

Razítko a čitelný podpis prodávajícího:

- 1) Firma Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava – Vítkovice tímto dává záruku na výrobek 2 roky ode dne vydání zboží kupujícímu.
V záruční době se Ortgroup Medical s.r.o. zavazuje vykonat nevyhnutelné opravy za účelem možnosti opětovného používání zboží v termínu do 30dní od obdržení reklamace.
- 2) Ortgroup Medical s.r.o. si vyhrazuje právo výměny zboží v případě, že náklady na opravu uzná za nerentabilní.
- 3) V případě zjištění nesprávného fungování zboží je potřebné jej bezodkladně odeslat na adresu prodejce nebo kontaktovat prodejce.
- 4) Před použitím výrobku je potřeba se seznámit s návodem na použití a řídit se instrukcemi v něm uvedenými. Použití výrobku v rozporu s jeho určením ztrácí nárok na záruku. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé použitím výrobku v rozporu s tímto návodem k použití nebo v případě nedodržení instrukcí obsažených v tomto návodu k použití.
- 5) Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé ostrým předmětem, poškození vzniklé v důsledku působení vnějších mechanických sil, znečištění zboží mastnými substancemi či benzínem.
- 6) TENTO ZÁRUČNÍ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNĚ SPOLU S DOKLADEM O KOUPI. V PŘÍPADĚ REKLAMACE PROSÍME O PŘÍLOŽENÍ DOKLADU O KOUPI.
- 7) Reklamacie bez dokladu o koupi nebudou akceptované.



Výrobce:

ANTAR Sp. J.
I.Groniecka-Tarnkowska, A.Tarnkowski
ul. Zawiślańska 43 03-068 Warszawa, Polsko
email antar@antar.net tel 22 518 36 00

Distribuce:

Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava - Vítkovice
E-mail: ortgroup@ortgroup.cz, www.ortgroup.cz
Tel.: 596 630 615



NÁVOD K POUŽITÍ

CHODÍTKO

MODEL :

AT02001, AT02002, AT02003



Datum vydání návodu 25.05.2021
Datum poslední revize: 07.03.2022

REV. V 02

Chodítka je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Chodítka poskytují uživateli dostatečnou podporu při chůzi, čímž zabraňují pádu uživatele. Maximální váha uživatele je 150kg.

MODEL:

AT02001 – 4 otočné kolečka. Rychlý pohyb uživatele ve všech směrech, je možné zablokovat chodítka použitím brzd. Tento model se doporučuje pro lidi s vysokou mobilitou, kteří nemají problémy s rovnováhou.

AT02002 – 2 kolečka. Umožňuje chůzi bez nadzvedávání chodítka.

AT02003 – 4 pevné nohy, nastavitelná velikost. Zajišťuje největší stabilitu. Pro chůzi je nutné chodítka s každým krokem nadzvednout. Doporučuje se především na krátké vzdálenosti.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

	AT02001	AT02002	AT02003
nastavitelná výška v cm	87-99	78-90	77-89
celková šířka	51	51	51
hmotnost v kg	4,2	3	2,75
skládací	ano	ano	ano
nosnost	150 kg	150 kg	150 kg
hloubka v cm	49	49	49
šířka složeného chodítka v cm	15	12	12



Tento symbol označuje maximální hmotnost uživatele


BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

Před používáním chodítka konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem. Před používáním chodítka si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě nejasností kontaktujte vašeho dodavatele. Uživatel chodítka musí dbát zvýšené opatrnosti. Uživatel se nesmí nedměrně naklánět, hlavně dozadu, jinak může dojít k převrácení. Chodítka nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost. Při skládání a rozkládání postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.


SLOŽENÍ A NASTAVENÍ CHODÍTKA:

Chodítka rozložte rozevřením bočních stran chodítka směrem od sebe až do polohy, kdy zapadne bezpečnostní pojistka, chráněná plastovou krytkou, umístěná v horní vzpěře chodítka. Pro složení chodítka zmáčkněte bezpečnostní pojistku a tlačte boční strany chodítka směrem k sobě. Chodítka je výškově nastavitelná. Pro nastavení výšky chodítka zmáčkněte z obou stran pojistku a tahem/tlakem nastavte požadovanou délku nohy. Pojistku pak nechte samostatně zapadnout do zvoleného otvoru. Postup opakujte u všech čtyřech noh.

U typu AT02003 využívejte při pohybu kloubové konstrukce – střídavě odlehčení bočního rámu na jedné straně a jeho následné předsunutí o krok vpřed vám výrazně usnadní manipulaci a zajistí návlek správného stereotypu chůze.

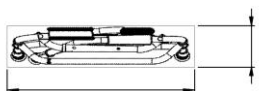

Zmenšené chodítka ve složeném stavu

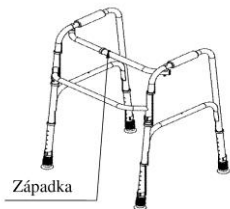


ÚDRŽBA:

Chodítka lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti a stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jističích prvků, stav pryžových nástavců a polohu aretačních pojistek, ev. odstraňovat mechanické nečistoty všech částí.

SERVIS A OPRAVA:

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který vám poskytne veškeré informace.

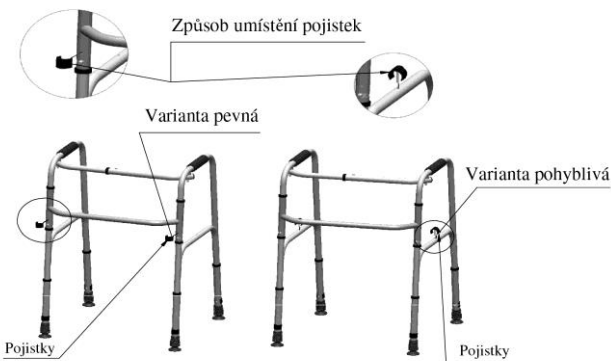

ZÁRUKA:

Záruka se poskytuje po dobu 24 měsíců od data převzetí pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakémkoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem než výrobcem či dovozcem (viz níže) nebo prodávajícím.

UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ:

- Nosnost chodítka je do 150 kg
- Model AT02001 nesmí užívat osoby, které mají problém s udržením rovnováhy-hrozí převrácení a pád uživatele
- Nenahýbat se přes okraj chodítka – hrozí převrácení a pád uživatele
- Nehoupat se na chodítka-hrozí převrácení a pád uživatele
- V případě, že čtyřkolové chodítka (typ AT02001) se zrovna nepoužívá, kolečka by měla být zabrzděna
- Nepoužívejte, jestliže váha uživatele překračuje 150 kg
- Chraňte před otevřeným ohněm

CHŮZE S CHODÍTKEM:

AT02003 – chodítka se mírně nadzvedne a posune vpřed

AT02002 – mírně se nadzvedne pevná část chodítka a posune se dopředu a zase se postaví na zem

AT02001 – chodítka se přesouvá mírným tlačáním vpřed do požadované strany.

LIKVIDACE PRODUKTU

Při likvidaci použitého chodítka je nutné dodržovat příslušné předpisy pro likvidaci odpadu. Důrazně doporučujeme kontaktovat vašeho místního autorizovaného dodavatele, který zajistí likvidaci vašeho chodítka

NEŽADOUCÍ PŘÍHODA

V případě „vážného incidentu“ souvisejícího s produktem, který vede přímo nebo nepřímo, může nebo by mohla vést k některé z následujících událostí:

- úmrtí pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
- dočasné nebo trvalé zhoršení zdravotního stavu pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
- vážné ohrožení veřejného zdraví

tato „vážná událost“ musí být nahlášena výrobcem a příslušnému orgánu členského státu, v němž má uživatel nebo pacient bydliště. V případě ČR je příslušným orgánem SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv, Odbor zdravotnických prostředků). Uživatel/pacient jsou povinni písemně oznámit výrobcem nebo zplnomocněnému zástupci a SÚKL jakoukoliv nežádoucí příhodu, která vznikla v souvislosti s použitím zdravotnického prostředku.

VAROVÁNÍ:

V případě bolesti, alergických reakcí nebo jiných rušivých příznaků souvisejících s používáním zdravotnického prostředku, které jsou pro uživatele nejasné, se poraďte s lékařem.

PROHLÁŠENÍ

Na tento výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě s Nařízením (EU) MDR 2017/745 v platném znění a ve shodě s legislativními požadavky ČR na zdravotnické prostředky v platném znění.