

## ZÁRUČNÍ LIST:

Typ: .....

Číslo série: .....

Datum prodeje: .....

Razítko prodejce a čitelný podpis prodávajícího: .....

1) Firma Ortgroup Medical s.r.o, 1. máje 3236/103, 703 00 Ostrava – Vítkovice, dává od data prodeje záruku 2 roky na invalidní vozík.

2) Během trvání záruční doby se firma Ortgroup Medical s.r.o zavazuje zajistit nezbytné opravy, aby byl invalidní vozík funkční, a to v období 30 dnů od datumu obdržení reklamovaného zboží.

3) Pokud Ortgroup Medical s.r.o zjistí, že náklady na opravu jsou nerentabilní, může dojít k výměně výrobku.

4) Pokud zjistíte, že výrobek funguje nesprávně, zašlete jej na adresu firmy Ortgroup Medical s.r.o (bod 1) nebo se obraťte na prodejce.

5) Než začnete výrobek používat, seznamte se s návodem k obsluze. Nedodržením pokynů výrobce, zaniká nárok na záruční opravu.

# NÁVOD

## K OBSLUZE INVALIDNÍCH VOZÍKŮ TYPU S-ERGO 305



Mechanický odlehčený vozík o standardní konstrukci rámu, doplněný však o několik moderních technických vylepšení. Rám vozíku je hliníkový o nosnosti 120 kg. Velmi dobrých jízdních vlastností bylo docíleno zdvojením konstrukce kříže vozíku a použitím hliníkových vzpěr kříže. Sedačka vozíku je "esovitě" prohnutá a díky tomu je i celodenní užívání vozíku velmi pohodlné. Pomáhá také zabránit dekubitům. Zádovou opěrku je možno pro potřebu transportu "zlomit". Vozík je dodáván v širších sedačky 41 cm, 43 cm nebo 46 cm. Potah sedáku a zádové opěrky vozíku je textilní, omyvatelný a velmi prodyšný. Vozík je doplněn odnímatelným polstrem. Loketní opěrky jsou výškově nastavitelné v rozsahu 23-28 cm nad úrovní sedačky a jsou odklopitelné. Zadní kola vozíku mají plný plášť o rozměru 24 x 1 3/8" s rychloupínacími osami a jsou doplněné plastovými blatníčky. Přední kola jsou plná o rozměru 200 x 50. Rám vozíku má metalický lak v barevné kombinaci antracit a stříbrná. Součástí vozíku v základním provedení jsou také stabilizační kolečka proti převrácení vozíku dozadu. Celková hmotnost vozíku v základním provedení je 15,6 kg.

## NÁVOD K OBSLUZE INVALIDNÍCH VOZÍKŮ TYPU S – ERGO 305

### 1. Obecné informace

Invalidní vozík je určen pro osoby s dočasnou nebo trvalou indispozicí samostatného pohybu. Vozík mohou používat osoby s váhou do 120 kg.

**Dříve než začnete invalidní vozík používat, je nutné se seznámit s tímto návodem, je to důležité pro bezpečnost uživatele.**

### 2. Bezpečnostní pokyny

- 1) Nastupování a vystupování z vozíku je nutné provádět při seřazených brzdách a zabrzděném vozíku.
- 2) Během jízdy se nesmí používat ruční brzdy ( ruční brzdou používejte pouze pokud se vozík nepohybuje)! Netýká se to ruční brzdy pro doprovod používané osobou, která vozík tlačí ( u typu, který to umožňuje).
- 3) Při naklánění dopředu, je nutné dávat pozor, aby se váha nepřemístila příliš dopředu. Abyste zvýšili stabilitu vozíku, před nakláněním dopředu je třeba se ujistit, že přední kola jsou nasměrovaná dopředu ve směru jízdy!
- 4) Nenaklánějte se příliš dopředu a také se nevyklánějte na bok vozíku!

**POZOR: NADMĚRNÉ NAKLÁNĚNÍ DOPŘEDU NEBO NA BOK MŮŽE VÉST K VYPADNUTÍ Z VOZÍKU A PORANĚNÍ!**

- 5) U nastupování a vystupování z vozíku nestůjte na podnožkách, může to vést k převrácení vozíku.

**POZOR: NESTŮJTE A NEVSTÁVEJTE NA PODNOŽKY!!VOZÍK SE MŮŽE PŘEVRRHNOUT A DOJÍT TAK K PORANĚNÍ!**

- 6) Během jízdy na vozíku dávejte pozor, aby se prsty rukou nedostaly mezi dráty, může dojít k poranění ruky.

- 7) Během jízdy na šikmé ploše, buďte opatrní a nedovolte zrychlení vozíku. Pokud máte obavy, zda se Vám to podaří, obraťte se bezpodmínečně o pomoc druhé osoby.

- 8) Vyvarujte se kontaktu vozíku s otevřeným ohněm. U přímého kontaktu textilních, plastových a gumových částí s ohněm, může dojít k jejich vznícení.

### 3. Obsluha a údržba

- vozík má systém seřízení výšky podnožek a zadních kol. Vozík se seřizuje odšroubováním zpevňujících šroubků a přizpůsobením požadavkům.

**Zádovou opěrku je možno pro potřebu transportu "zlomit"**

- vozík má skládací rám – vozík skládáme povytažením prostřední části sedačky směrem nahoru (nejdříve je nutné odepnout polštář, který je připevněný k sedačce suchým zipem), vozík se rozkládá přitlačením boků sedačky směrem dolů.

**Je nutné dávat pozor, aby boky sedačky byly v plastových úchytkách. Nesprávné rozložení sedačky může vést k prasknutí úchytek a poškození vozíku.**

- je nutné pravidelně kontrolovat stav vozíku a zajišťovat jeho údržbu:

- a) kontrolovat stav pneumatik – pokud jsou opotřebované, vyměňte je.
- b) kontrolovat přitáhnutí šroubků spojovacích částí.
- c) čištění ušpiněného vozíku vlhkých hadříkem.
- d) čištění čalounění vlhkých hadříkem, případně s použitím čistících prostředků.
- e) dezinfekce čalounění vozíku určenými dezinfekčními prostředky s atestem.

### 4. Jízda na vozíku

Během jízdy na vozíku položte dlaně tak, aby byl palec podél horní části kola, a prsty přidržovaly jeho dolní část. Zajišťuje to silné uchycení a rychlé uvolnění kol. Kola uchopíte dlaní na úrovni opěradla a energickým pohybem je tlačíte dopředu. Podél kol je namontovaná obruč, která zjednodušuje tlačení kol. Po ukončení pohybu, dejte dlaně zpět na výchozí bod, tak, aby udělaly kruh. Díky tomu záda a ramena při zpětném pohybu nejsou zatíženy. Neposouvajte dlaně do výchozího bodu podél hnacího kola. Vozík je vyroben tak, aby bylo maximální zatížení na zadních kolech (velké). Tímto způsobem přední kola (malá) jsou odlehčená, což zabraňuje jejich opotřebování. Výše uvedené sestavení vozíku ale vytváří jisté riziko převrácení vozíku během jízdy na rampách, šikmých plochách nebo zvládání jiných překážek, pokud nejsou dodržované bezpečnostní pokyny. Doporučujeme proto důkladně se seznámit s pokyny uvedenými v bodech „Bezpečnostní pokyny“ a „Zvládání překážek“.

### 5. Zvládání překážek

- při výběru vozíku doporučujeme obrátit se na odborného lékaře - pokud z jakékoliv příčiny nejste schopni zvládnout překážky, obraťte se o pomoc. Při pokusu o samostatné zvládnutí překážky může dojít k převrácení vozíku a poranění.
- většina uživatelů je schopna samostatně zvládnout menší překážky.
- při překonávání malého prahu (obrubníku) – zepředu kolmo k ose prahu, se ujistěte, zda podnožkám neprekážá povrch a sjeďte z prahu. Vyvarujte se nachýlení dopředu.
- při překonávání velkého prahu (obrubníku) – zezadu kolmo k ose prahu, nachýlit se a přenést váhu dopředu, sjet z překážky a hlídat si rychlost sjezdu přibrzdžujíc rukama hnací kola.
- **u strmých překážek nebo schodech vždy požádejte o pomoc.**
- vjíždění na práh – vjíždění na práh vyžaduje od uživatele zkušenost a sílu. Přeneste celou váhu na zadní kola a překonejte práh, obraťte se bezpodmínečně o pomoc na druhou osobu.

### POPIS:

- skládací odlehčený hliníkový rám
- odklopné a odnímatelné postranice
- odnímatelné nastavitelné stupačky
- loketní opěrky výškově nastavitelné
- rychloupínací zadní kola
- zadní kola vozíku plná o rozměru 24 x 1 3/8"
- přední kola jsou plná o rozměru 200 x 50 cm
- měnitelné výškové uchycení zadního kola
- antibakteriální podložka
- lytkový pás
- parkovací brzdy
- plastové blatníčky
- barevné provedení: kombinace antracit a stříbrná.
- zádovou opěrku je možno pro potřebu transportu "zlomit"
- odnímatelné rolničky proti převrácení.

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

- Šířka sedačky: 41 cm, 43 cm, 46 cm
- Hmotnost vozíku: 15,6 kg
- Nosnost vozíku: 120 kg



Výrobce:  
Karma Medical Products Co., LTD.  
NO.2363, Sec. 2, University Rd., Min-Hsiung Shiang, Chia-Yi 621, Taiwan



Autorizovaný zástupce v Evropské unii:  
Karma Mobility Limited.  
Unit 6, Target Park, Shawbank Road,  
Reddich B98 8YN U.K.

Distribuce:  
Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava – Vítkovice  
IČ: 268 58 347 DIČ: CZ 268 58 347

