

Hole, trojnožky a čtyřnožky

Návod k použití

Hole, trojnožky a čtyřnožky jsou určeny k podepření při chůzi pro osoby s omezenou schopností pohybu. Hole mají jeden podstavec, trojnožky tři a čtyřnožky čtyři podstavce.

Zařízení držte v opačné ruce, než je nemocná noha. V situaci, kdy stojíte na nemocné noze, se současně opřete o hůl.

Upozornění: Hůl držte ve svislé poloze, aby tvořila stabilní podporu. Nadměrné vychýlení hole může způsobit její podklouznutí a pád uživatele.

Výrobce:

ANTAR Sp. J.
ul. Zawisłańska 43
03-204 Warszawa

Dovozce:

Ortgroup Medical s.r.o.
1. Máje 3236/103
703 00 Ostrava-Vítkovice



rev. 09.2015