

ZÁRUČNÍ LIST

Datum prodeje:

Razítko a čitelný podpis prodávajícího:

- 1) Firma Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava – Vítkovice tímto dává záruku na výrobek 2 roky ode dne vydání zboží kupujícímu.
- 2) V záruční době se Ortgroup Medical s.r.o. zavazuje vykonat nevyhnutelné opravy za účelem možnosti opětovného používání zboží v termínu do 30dní od obdržení reklamace.
- 3) Ortgroup Medical s.r.o. si vyhrazuje právo výměny zboží v případě, že náklady na opravu uzná za nerentabilní.
- 4) V případě zjištění nesprávného fungování zboží je potřebné jej bezodkladně odeslat na adresu prodejce nebo kontaktovat prodejce.
- 5) Před použitím výrobku je potřeba se seznámit s návodem na použití a řídit se instrukcemi v něm uvedenými. Použití výrobku v rozporu s jeho určením ztrácí nárok na záruku. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé použitím výrobku v rozporu s tímto návodem k použití nebo v případě nedodržení instrukcí obsažených v tomto návodu k použití.
- 6) Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé ostrým předmětem, poškození vzniklé v důsledku působení vnějších mechanických sil, znečištění zboží mastnými substancemi či benzínem. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé použitím výrobku v rozporu s tímto návodem k použití nebo v případě nedodržení instrukcí obsažených v tomto návodu k použití. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé ostrým předmětem, poškození vzniklé v důsledku působení vnějších mechanických sil, znečištění zboží mastnými substancemi či benzínem.
- 7) TENTO ZÁRUČNÍ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNĚ SPOLU S DOKLADEM O KOUPI. V PŘÍPADĚ REKLAMACE PROSÍME O PŘILOŽENÍ DOKLADU O KOUPI. Reklamace bez dokladu o koupi nebudou akceptované.

Výrobce:



Karma Medical Products Co., LTD.
NO.2363, Sec. 2, University Rd., Min-Hsiung Shiang, Chia-Yi 621, Taiwan

REP

Autorizovaný zástupce v Evropské unii:
Karma Mobility S.L.
C/ Periodista Francisco Carantoña Dubert,
23 Bajo 33209 Gijón - Asturias (Španělsko)
telefon: +34 984 390 907
karma@karmamobility.es



Distribuce:
Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava – Vítkovice
E-mail: ortgroup@ortgroup.cz, www.ortgroup.cz
Tel./fax: 596 630 615
IČ: 268 58 347 DIČ: CZ 268 58 347

NÁVOD K OBSLUZE INVALIDNÍCH VOZÍKŮ MODEL: S – ERGO 115, S-ERGO 125



Datum vydání návodu 25.05.2021
Datum poslední revize: 07.03.2022
REV. V 02

Mechanický vozík o standardní konstrukce rámu je doplněný o několik moderních technických vylepšení. Rám vozíku je hliníkový o nosnosti 120 kg. Velmi dobrých jízdních vlastností bylo docíleno zdvojením konstrukce kříže vozíku a použitím hliníkových vzpěr kříže. Sedačka vozíku je „esovitě“ prohnutá a díky tomu je i celodenní užívání vozíku velmi pohodlné. Zádovou opěrku je možno pro potřebu transportu „zlomit“ - z obrázku níže je pak patrné, jak složený vozík je tak kompaktní pro transport. Vozík je dodáván v širších sedačky 41 cm, nebo 46 cm. Potah sedáku a zádové opěrky vozíku je textilní, omyvatelný a velmi prodyšný. Vozík je doplněn odnímatelným polstrem. Loketní opěrky jsou odklopitelné. Stupačky vozíku jsou dvoudílné, délkově nastavitelné, odklopitelné a odnímatelné, doplněné patěnkami. Zadní kola vozíku mají plný plášť o rozměru 24 x 1 3/8“ s rychloupínacími osami. Přední kola jsou plná o rozměru 200x25. Rám vozíku má metalický lak v barevné kombinaci antracit a červená. Celková hmotnost vozíku v základním provedení je 14,5 kg.

OBEČNÉ INFORMACE

Invalidní vozík je určen pro osoby s dočasnou nebo trvalou indispozicí k samostatnému pohybu. Vozík mohou používat osoby váhy do 120 kg. Přehled vlastností a dodatečného příslušenství vozíku je uveden v přehledu, který je součástí tohoto návodu.

Dříve než začnete invalidní vozík používat je nutné se seznámit s tímto návodem, je to důležité pro bezpečnost uživatele.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Nastupování a vystupování z vozíku je nutné provádět při seřizených brzdách a zabrzděném vozíku.
- Během jízdy se nesmí používat brzdy (jen pouze pokud se vozík nepohybuje)! Netýká se to ruční brzdy používané osobou, která vozík tlačí (u typu, který to umožňuje).
- Při naklánění dopředu, je nutné dávat pozor, aby se váha nepřemístila příliš dopředu. Abyste zvýšili stabilitu vozíku, před nakláněním dopředu je třeba se ujistit, že přední kola jsou nasměrovaná dopředu ve směru jízdy!
- Nenaklánějte se příliš dopředu a také se nevyklánějte na bok vozíku!

POZOR: NADMĚRNÉ NAKLÁNĚNÍ DOPŘEDU NEBO NA BOK MŮŽE VÉST K VYPADNUTÍ Z VOZÍKU A PORANĚNÍ!

e) U nastupování a vystupování z vozíku nestůjte na podnožkách, může to vést k převrácení vozíku.

POZOR: STÁVÁNÍ NA PODNOŽKÁCH MŮŽE VÉST K PŘEVŘÁCENÍ VOZÍKU A PORANĚNÍ!

f) U vjíždění na prahy nebo jiné překážky, u přenášení celé váhy na zadní kola, buďte opatrní. Pokud máte obavy, zda se to podaří, obraťte se bezpodmínečně o pomoc na druhou osobu.

POZOR: NEOBRATNÉ NEBO NEOPATRNE PŘENÁŠENÍ VÁHY NA ZADNÍ KOLA MŮŽE VÉST K PŘEVŘÁCENÍ VOZÍKU DOZADU, COŽ JE VELICE NEBEZPEČNÉ A MŮŽE DOJÍT K VÁŽNĚMU PORANĚNÍ! V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV POCHYBNOSTÍ, ZDA JE BEZPEČNÉ PŘEKÁŽKU PŘEKONAT, OBRAŤTE SE BEZPODMÍNEČNĚ O POMOC NA DRUHOU OSOBU!

- Během jízdy na vozíku dávejte pozor, aby se prsty rukou nedostaly mezi dráty, může dojít k poranění ruky.
- Během jízdy na šikmé ploše, buďte opatrní a nedovolte k zrychlení vozíku. Pokud máte obavy, zda se Vám to podaří, obraťte se bezpodmínečně o pomoc na druhou osobu.

i) Vyvarujte se kontaktu vozíku s otevřeným ohněm.

U přímého kontaktu textilních, plastových a gumových části s ohněm, může dojít k jejich vznícení.

OBSLUHA A ÚDRŽBA

Zádovou opěrku je možno pro potřebu transportu „zlomit“

- vozík má skládací rám – vozík skládáme povytažením prostřední části sedačky směrem nahoru (nejdřív je nutné odepnout polštář, který je namontovaný k sedačce suchým zipem), vozík se rozkládá přitlačení boků sedačky směrem dolů. **Je nutné dávat pozor, aby boky sedačky byly v plastových úchytkách. Nesprávné rozložení sedačky může vést k prasknutí úchytek a poškození vozíku.**

- je nutné pravidelně kontrolovat stav vozíku a zajišťovat jeho údržbu:

- kontrolovat stav pneumatik – pokud jsou opotřebené, vyměňte je.
- kontrolovat přitáhnutí šroubků spojovacích částí.
- čištění ušpiněného vozíku vlhkých hadřík
- čištění čalounění vlhkých hadříkem, případně s použitím čistících prostředků.
- dezinfekce čalounění vozíku určenými dezinfekčními prostředky s atesty.

JÍZDA NA VOZÍKU

Během jízdy na vozíku dlaně položte tak, aby byl palec podél horní části kola, a prsty přidržovaly jeho dolní část. Zajišťuje to silné uchycení a rychlé uvolnění kol. Kola uchopíte dlaní na úrovni opěradla a energickým pohybem je tlačte dopředu. Podél kol je namontované vodítko, které zjednodušuje tlačení kol. Po ukončení pohybu, dlaně dejte zpět na výchozí bod, tak, aby udělaly kruh. Díky tomu záda a ramena při zpětném pohybu nejsou zatížena. Neposouvajte dlaně do výchozího bodu podél hnacího kola. Vozík je vyroben tak, aby maximální zatížení bylo na zadní kola (velká). Tímto způsobem přední kola (malá) jsou odlehčená, co zabraňuje jejich opotřebenosti. Výše

uvedené sestavení vozíku ale vytváří jisté riziko převrácení vozíku během jízdy na rampách, šikmých plochách nebo u zvládání překážek, pokud nejsou dodržované bezpečnostní pokyny. Doporučujeme proto důkladně se seznámit s pokyny uvedenými v bodech „Bezpečnostní pokyny“ a „Zvládání překážek“.

ZVLÁDÁNÍ PŘEKÁŽEK

- při výběru vozíku doporučujeme se obrátit na odborného lékaře-pokud z jakékoliv příčiny nejste schopni zvládnout překážky, obraťte se o pomoc. Při pokusu o samostatné zvládnutí překážky může dojít k převrácení vozíku a poranění.

- většina uživatelů je schopna samostatně zvládnout menší překážky.

- při překonávání malého prahu (obrubníku) – zepědu kolmo k ose prahu, ujistěte se, zda podnožkám nepřekáží povrch a sjezd z prahu. Vyvarujte se nachýlení dopředu.

- při překonávání velkého prahu (obrubníku) – zezadu kolmo k ose prahu, nachýlit se a přenést váhu dopředu, sjet z překážky a hlídat si rychlost sjezdu při brzdění rukama hnací kola.

- **u strmých překážek nebo schodů vždy požádejte o pomoc.**

- vjíždění na prah – vjíždění na prah vyžaduje od uživatele zkušenost a sílu. Přeneste celou váhu na zadní kola a překonejte prah, tlačíc rukama hnací kola vyvážením těla. Vozík je nutné nasměrovat kolmo k překážce. Vyvážením těla je nutné umístit přední kola na překážku a následně přenést váhu těla dopředu (nakláněním dopředu) a tlačíc hnací kola najet na překážku. **U strmých nebo velkých překážek požádejte bezpodmínečně o pomoc.** Osoba, která pomáhá, pokládá nohu na jedné z vyčnívajících trubek a naklání vozík dozadu, a následně zvládá překážku.

- u jízdy na šikmých plochách je třeba dávat zvýšenou pozornost, aby se vozík během jízdy nestal nevládnutelným. Je důležité celou dobu kontrolovat rychlost vozíku, aby nedošlo k velké rychlosti. Pokud máte obavy, zda se Vám to podaří, obraťte se bezpodmínečně o pomoc na druhou osobu.

POPIS:

Skládací odlehčený hliníkový rám

Odklopné postranice (**jen model S-Ergo 125**)

Odnímatelné nastavitelné stupačky

Rychloupínací zadní kola

Zadní kola vozíku plná o rozměru 24 x 1 3/8“

Přední kola jsou plná o rozměru 200 x 25

Antibakteriální podložka

Parkovací brzdy

Zádovou opěrku je možno pro potřebu transportu „zlomit“

Odnímatelné kolečka proti převrácení.

Šířka sedačky: 41 cm, 46 cm, 51 cm

Hmotnost vozíku: 14,5 kg

Nosnost vozíku: 120 kg

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne

veškeré informace.

LIKVIDACE

Při likvidaci použitého výrobku je nutné dodržovat příslušné předpisy pro likvidaci odpadu. Výrobek nepatří do komunálního odpadu. Výrobek obsahuje části, které lze dále recyklovat. Proto jej po ukončení používání zlikvidujte předáním do sběrného dvora.

NEŽADOUcí PŘÍHODA

V případě „vážného incidentu“ souvisejícího s produktem, který vede přímo nebo nepřímo, může nebo by mohla vést k některé z následujících událostí:

- úmrtí pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
- dočasné nebo trvalé zhoršení zdravotního stavu pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
- vážné ohrožení veřejného zdraví

tato „závažná událost“ musí být nahlášena výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, v němž má uživatel nebo pacient bydliště. V případě ČR je příslušným orgánem SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv, Odbor zdravotnických prostředků. Uživatel /pacient jsou povinni písemně oznámit výrobcí nebo zplnomocněnému zástupci a SÚKL jakoukoliv nežádoucí příhodu, která vznikla v souvislosti s použitím zdravotnického prostředku.

PROHLÁŠENÍ

Na tento výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě s Nařízením (EU) MDR 2017/745 v platném znění a ve shodě s legislativními požadavky ČR na zdravotnické prostředky v platném znění.