

Vodní ortopedický polštář - AT52117



Vodní ortopedický polštář AT52117 je unikátní řešení, které kombinuje všechny výhody tradičních ortopedických polštářů s velkým komfortem použití.

- zlepšuje kvalitu spánku
- zabraňuje ranním bolestem šíje a ramen
- zabraňuje ranním bolestem hlavy
- optimálně podpírá hlavu a krk v každé poloze, čímž umožňuje těmto svalům během spánku odpočívat

Polštář se skládá ze 3 vrstev:

1. měkká a hypoalergická vrstva polyesteru, zvyšující pohodlí
2. tepelná izolace kolem celé vodní vrstvy
3. vodní vrstva, umožňující dokonalou podporu hlavy a šíje ve všech polohách

Na rozdíl od tradičních ortopedických polštářů nenavozuje pocit napětí svalů šíje v první fázi užívání. Voda se tlakem přesouvá a tím poskytuje maximální podporu pro hlavu a šíji v každém okamžiku spánku. Podpora šíje je zajištěna vodou, která se díky tlaku hlavy přesune. Doléváním a vyléváním vody je možné nastavit stupeň tvrdosti polštáře dle individuálních potřeb.

Návod k použití:

Krok 1.



Použijte klíč určený k vyjmutí víčka. Vložte základnu trychtýře na kryt ventilu a použijte jako klíč k uvolnění víčka. Kryt se sejme otočením proti směru hodinových ručiček.

Krok 2.




Pomocí nálevky vlijte vodu do určeného vaku. Nálevku přišroubujte k ventilu - dotáhněte a použijte jako trychtýř.

Krok 3.



Polštář postavte na židli tak, aby se opíral o opěradlo židle a nálevka byla nahoře. Naplňte vak množstvím vody tolik, aby bylo dosaženo požadované pevnosti (množství potřebné vody viz tabulka).

Krok 4.

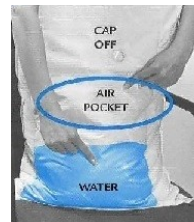


Ve vaku se utvoří vzduchová bublina, kterou je nutné odstranit. Jemným stlačením najdete horní hladinu vody ve vaku.

Krok 5.



Jemným stlačením najděte horní hladinu vody ve vaku. Opatrně vyrovnejte zbývající část vaku tak, aby se voda oddělila a vzduch se dal odstranit.

Krok 6.

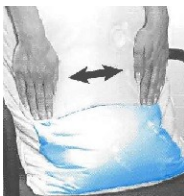

Jemným tlakem vytlačte vzduch přes otvor. Po odstranění veškerého vzduchu s vaku zašroubujte víčko.

Tabulka určení správného množství vody:

Soft	2 litry
Medium	3 litry
Firm	4-5 litrů

Příliš tvrdý – uberte vodu.

Příliš měkký – přidejte více vody.

Upozornění:

Používejte studenou nebo vlažnou vodu. Voda by neměla mít teplotu vyšší než 38°C.

Vodu je potřeba vyměnit alespoň 1x ročně.

V případě, že je voda tvrdá, je nutno přidat změkčovač vody.



ANTAR Sp. J

Ul. Zawiańska 43
03-068 Warszawa
Tel. 22 518 36 00
Fax 22 518 36 30
www.antar.net



Výhradní dovozce:
Ortgroup Medical s.r.o.
1.Máje 3236/103
703 00 Ostrava – Vítkovice
Tel.: 596 630 615
www.ortgroup.cz