

NÁVOD K POUŽITÍ NÁSTAVCE NA WC CONTACT PLUS 500 200



Nástavce se doporučují zejména pro osoby po úrazu kyčlí (např. zlomeniny v oblasti kyčlí), dále pro osoby tělesně postižené a osoby se sníženou schopností pohybu. Použití se nedoporučuje osobám těžce mentálně postiženým. Používají se hlavně tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen použít standardní mísu wc. Uspadňují pacientům běžné úkony osobní hygieny a také snižují možné riziko při těchto úkonech. Zlepšují rovněž manipulaci s pacientem.

Popis:

Nástavec na wc CONTACT PLUS 500 200 je vyroben z pěny s vysokou hustotou, která je vstříkována do vodotěsné PVC kůže.

Parametry:

420x400x110 mm

Hmotnost: 2850 g.

Maximální hmotnost uživatele: 185 kg

Návod k použití:

Nástavec na wc Contact plus 500 200 položte výřezem dopředu na wc mísu a zatlačte.

Varování: Před použitím vyzkoušejte, zda je nástavec dobře nasazen na wc (nesmí se hýbat).



Údržba:

Nástavec by měl být denně umýván neabrasivními čistidly. Můžete použít běžné mycí prostředky bez obsahu chlóru nebo mýdlovou vodou.

Prodejce :
Ortgroup Medical s.r.o.
ul. 1. Máje 3236/103
703 00 Ostrava – Vítkovice
tel./fax. 596 630 615
www.ortgroup.cz

Výrobce:
Herdegen
5/7 Rue Eugene Freyssinet
775 00 Chelles
Francie



NÁVOD K POUŽITÍ NÁSTAVCE NA WC CONTACT PLUS 500 200



Nástavce se doporučují zejména pro osoby po úrazu kyčlí (např. zlomeniny v oblasti kyčlí), dále pro osoby tělesně postižené a osoby se sníženou schopností pohybu. Použití se nedoporučuje osobám těžce mentálně postiženým. Používají se hlavně tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen použít standardní mísu wc. Uspadňují pacientům běžné úkony osobní hygieny a také snižují možné riziko při těchto úkonech. Zlepšují rovněž manipulaci s pacientem.

Popis:

Nástavec na wc CONTACT PLUS 500 200 je vyroben z pěny s vysokou hustotou, která je vstříkována do vodotěsné PVC kůže.

Parametry:

420x400x110 mm

Hmotnost: 2850 g.

Maximální hmotnost uživatele: 185 kg

Návod k použití:

Nástavec na wc Contact plus 500 200 položte výřezem dopředu na wc mísu a zatlačte.

Varování: Před použitím vyzkoušejte, zda je nástavec dobře nasazen na wc (nesmí se hýbat).



Údržba:

Nástavec by měl být denně umýván neabrasivními čistidly. Můžete použít běžné mycí prostředky bez obsahu chlóru nebo mýdlovou vodou.

Prodejce :
Ortgroup Medical s.r.o.
ul. 1. Máje 3236/103
703 00 Ostrava – Vítkovice
tel./fax. 596 630 615
www.ortgroup.cz

Výrobce:
Herdegen
5/7 Rue Eugene Freyssinet
775 00 Chelles
Francie

