

ZÁRUČNÍ LIST

Model:.....

Sériové číslo:.....

Datum prodeje:.....

Razítko prodejního místa a čitelný podpis prodávajícího:.....

- 1) Firma ANTAR Sp. J., 03-068 Warszawa, ul. Zawisłańska 43, poskytuje záruční dobu na výrobek 12 měsíců od data prodeje.
- 2) Během záruční doby se firma ANTAR zavazuje provést nezbytné opravy do 30 dnů ode dne, kdy byla podána reklamáce
- 3) Firma ANTAR si vyhrazuje právo na výměnu výrobku v případě, že výrobek nelze opravit, popř. se oprava nevyplatí
- 4) V případě, že výrobek správně nefunguje, je kupující oprávněn bezprostředně nefunkční výrobek zaslat v rámci reklamáce zpět na adresu prodávajícího, popř. kontaktovat prodejce
- 5) Před použitím si důkladně prostudujte návod k použití. V případě použití výrobku k jinému účelu, než byl vyroben a prodán ztrácíte nárok na záruční lhůtu
- 6) Záruční doba se nevztahuje při poškození ostrým předmětem, poškození v důsledku mechanického působení vnějších sil, tlaku na maximální nosnost dle návodu, při kontaminování výrobku olejovými či benzínovými substancemi
- 7) Tento dokument je platný pouze s dokladem o koupi (pokladní účtenka, faktura)
- 8) Reklamáce bez udání důvodu nebude brána na zřetel

Návod k použití

TOALETNÍ KŘESLO – model: AT01001, AT01002, AT01003



Toaletní křeslo – model AT01001, AT01002, AT01003 jsou moderní výrobky pro osoby se sníženou pohyblivostí. Mohou být použity v blízkosti lůžka nebo místa, kde se osoba se sníženou pohyblivostí nachází, tudíž odpadá nutnost přemísťování těchto osob na toalety. Díky použití lehkých materiálů se snadno přesunou na místo určení. Model AT01003 je vybaven kolečky, takže se toaletní křesla dají převézt dle potřeby na různá místa (uživatel nesmí sedět na toaletním křesle během přemísťování). U modelu AT01002 je možné upravit šířku sedadla nebo rozložení, což umožňuje lehčí přenesení.

UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

- Nosnost toaletního křesla je do 150kg
- Nehoupat se – hrozí pád a zranění uživatele, zničení výrobku
- Před použitím zkontrolovat, zda je nádoba správně umístěna a kryt odstraněn
- Po použití nádobu ihned vyjmout a vyčistit
- Vyhýbejte se kontaktu s otevřeným ohněm, výrobek se může vznítit

POUŽITÍ



Před použitím toaletního křesla. Vytáhněte pojistku, nastavte do potřebné výšky u všech 4 noh a vraťte pojistku zpět. **UJISTĚTE SE, ŽE POJISTKA JE SPRÁVNĚ VSAZENÁ.** V opačném případě je toaletní křeslo nestabilní a pojistka se může zničit.



Před vsazením nádoby zvedněte víko. Zasuňte bokem nádobu do úchytek. Po vykonání potřeby vyjměte nádobu, přiklopte víkem, vynesete a vyčistěte.

ÚDRŽBA VÝROBKU

Toaletní křeslo se čistí pomocí čistících prostředků a vody. Může se čistit i dezinfekčními prostředky. Nepoužívaný výrobek musí být uchovávan v suchu a chráněn před slunečním zářením.

LIKVIDACE POUŽITÉHO VÝROBKU

S vyřazeným výrobkem se zachází jako s komunálním odpadem. Výrobek se doporučuje po vyřazení z provozu oddělit od ostatních.



TOALETNÍ KŘESLO AT01002 – skládací verze s nastavitelnou šířkou sedadla

U modelu AT01002 je možné rozložení a regulace šířky sedadla. K tomu slouží pojistky k upevnění. Natavte požadovanou šířku a dle obrázku upevněte pojistky. **ZKONTROLUJTE, ZDA JSOU POJISTKY SPRÁVNĚ NASAZENY – PO OBOU STRANÁCH TRUBEK.** Při nesprávném nasazení pojistek je toaletní křeslo nestabilní a hrozí zničení pojistek a otvoru.

TOALETNÍ KŘESLO AT01003 – pojízdné

Při převozu výrobku je nutno nejdříve kolečka odbrzdít a po převozu na místo určení opět zabrzdit. **KOLEČKA MUSÍ BÝT ZABRŽDĚNY JEŠTĚ PŘEDTÍM, NEŽ SI UŽIVATEL NA KŘESLO SEDNE.**

POKUD UŽIVATEL SEDÍ NA KŘESLE, NESMÍ SE S KŘESLEM MANIPULOVAT.

ANTAR Sp. J
Ul. Zawiślańska 43
03-068 Warszawa
Tel. 22 518 36 00
Fax 22 518 36 30
www.antar.net

